

# MedM

## kids

# FFP2 NR

## Partikelfiltrierende Halbmaske

Model: WL-P2095

EN149:2001+A1:2009

### CE 1463

- persönliche Schutzausrüstung (PSA)
- kein Medizinprodukt



Fünf Schichten  
Starker  
Filterungsschutz



Anti-Beschlag-  
Beschichtung  
partikelsicher  
anti-spiegel



Wirksamer  
Filterfaktor  
von mind. 94%



#### Anleitung

1. Entfalten Sie die Maske, ziehen Sie die Bänder an beiden Enden um die Ohren und positionieren Sie die Maske auf Ihrem Gesicht (mit dem verstellbaren Metallstreifen nach oben zeigend).
2. Pressen Sie den Metallstreifen leicht nach unten, um zu gewährleisten, dass die Maske sicher abdichtet und der Nasenform angepasst ist.
3. Drücken Sie die Maske leicht auf Ihr Gesicht auf, um sie der Gesichtsform anzupassen.



6974074600029



2021-02

LOT

291-02-02-21



2024-01

#### Lager- und Transportbedingungen

Halten Sie die Masken in der Verpackung bis zur Verwendung von direktem Sonnenlicht oder Verunreinigungen fern. Umgebungstemperatur zwischen -20°C bis +40° und relative Luftfeuchtigkeit <80%, kein korrosives Gas, gute Belüftung.

Während des Transportes von Feuchtigkeit, Licht und Wärme fernhalten.

#### Haltbarkeit:

3 Jahre

#### Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt, das normalerweise in der allgemeinen Arbeitsumgebung verwendet wird, bietet einen zuverlässigen Schutz vor bestimmten luftgetragenen Partikeln wie Staub und Tröpfchenübertragung.

#### Vorsichtsmaßnahmen

1. Die Empfehlung der BGW zu den maximalen Tragezeiten, der Erholungs-dauer und den nötigen Pausen bei der Nutzung von FFP2/FFP3-Masken beruht auf der DGUV Regel 112-190 "Benutzung von Atemschutzgeräten". Hiernach beträgt die maximale Tragezeit längstens 75 Minuten mit anschließender Mindesterholungs-dauer von 30 Minuten.
2. Niemals Teile in der vom Hersteller angegebenen Konfiguration ersetzen, ändern, hinzufügen oder weglassen.
3. Diese Maske trägt zum Schutz gegen bestimmte partikelförmige Verunreinigungen bei, schließt jedoch das Risiko einer Erkrankung oder Infektion nicht vollständig aus.
4. Verwenden Sie die partikelfiltrierende Halbmaske nicht mit Bedingungen, die eine gute Gesichtsabdichtung verhindern können. Die Anforderungen an eine Leckage werden nicht erfüllt.
5. Ersetzen Sie die Maske, wenn
  - A) sie beschädigt ist
  - B) sie durch abhusten von innen kontaminiert ist
  - C) sich auf der Innenseite Feuchtigkeit bildet.

EN 149:2001+A1:2019



Qingdao Weili Protective Articles Co., Ltd  
Industrial Park, Ducun, Jiaoxi Office  
Jiaozhou, Qingdao, Shandong, China 266327

Hergestellt in China.